

GYÁRTÓI NYILATKOZAT

MOSÁSI / FERTŐTLENÍTÉSI IRÁNYMUTATÓ

Termék azonosító: EPO-40

Megnevezése: OVERALL

Antiallergén, antibakteriális, szoros kötés-szerkezetű újra-hasznosítható nem szőtt, mosható, 2x2 rétegű orvosi / egészségügyi textíliából készült kapucnis overall.

Nagyon magas szűrési sebességű, fertőtleníthető, többször mosható, többször használható szájmaszka.

Alapanyag:

Szoros kötés-szerkezetű antiallergén, antibakteriális, újra-hasznosítható, textil hatású nem szőtt egészségügyi, 2 rétegben préselt szövet, mely alapját polietilén képezi, elhasználódását követően újra-hasznosítható.

Mosás:

- javasolt a folyékony, olajos/zsíros textíliamosóval történő mosás, ami nem tömíti el a szövésből adódó pórusokat
- mosási hőmérséklet max. 40 C° , magasabb hőfokon történő mosás károsítja az anyag szerkezetét
- anyagában festett, így színtartó
- az anyag 50x mosható, azonban fontos tudni, hogy :
 - cca. 10. mosás után az alapanyag felpuhul, ami a védelmi képességét nem csökkenti
 - mivel nem szőtt textília, ezért minimális mértékben veszít az anyagvastagságából
- vasalni csak és kizáróan nagyon alacsony hőmérsékleten, max. 50 fok, azonban javasolt a vasalás kiiktatása
- szárítógépben szárítani tilos (vattapamacsos lesz)

Fertőtlenítés:

- fertőtlenítés céljából fontos, hogy klórtartalmú, fertőtlenítő hatású mosószerrel mossuk (pl. Flóraszept) és utána pedig minimum 3-4x-es öblítés tiszta vízben
- további fertőtlenítési eljárás : fertőtlenítő szerrel történő befecskendezés, minimum 15-20 perc pihentetés, majd alapos, minimum 3-4x-es öblítés

A jelzett információk az alapanyaggyártó által adott adatokra alapozva kerültek rögzítésre.

